

## Wichtige Hinweise für die Milchprobenentnahme

1. Nur eine saubere Probenentnahme führt zu einem aussagefähigen Ergebnis
2. saubere Einmalhandschuhe tragen
3. Probenröhrchen vor der Probennahme mit Name oder Stall-Nr. beschriften (siehe Aufkleber).
4. 2 bis 3 Milchstrahlen abmelken
5. Euter mit Einmaltüchern reinigen
6. Zitzenenden, vor allem Strichkanalöffnung, mit Alkoholpads desinfizieren nach der Desinfektion nochmals einen Strahl Milch werfen
7. Halten Sie das Proberöhrchen schräg, damit keine Schmutzpartikel hineinfallen und befüllen Sie es ohne mit dem Röhrchen die Zitze zu berühren. Den Deckel des Röhrchens bitte nur am oberen Rand anfassen. Befüllen Sie das Röhrchen zu  $\frac{3}{4}$  mit Milch aus einem Viertel.
8. Die im Probefläschchen enthaltene Flüssigkeit dient der Konservierung und darf nicht verschüttet werden.
9. Proben müssen bis zum Versand gekühlt werden

